

# Hygienický plán - SUDÝ TÝDEN

**HENRY SCHEIN®**  
DENTAL

Místo a způsob použití		Název	Koncentrace čas expozice	Spektrum účinnosti	Účinná látka
Nástroje	Ruční nástroje	Eurosept Xtra Instrument Dezinfekce na nástroje	1,5 % 15 min. 1 % 5 min.	A L (B) A L (B) v ultrazvukové lázni	KAS
		Eurosept Xtra Enzymatický čistič	0,5–1 % pro běžné znečištění, až 5 % pro silné znečištění 5–30 min. v závislosti na úrovni znečištění	–	Ostatní
	Rotační nástroje	Eurosept Xtra Bur Dezinfekce na rotační nástroje	neředěné 5 min.	A L (B) M	KAS
Plochy	Malé plochy Násadce, kolénka, turbíny	Eurosept Xtra Surface Postřiková dezinfekce na malé i citlivé plochy bez alkoholu	neředěné 1 min.	A L (B)	KAS
		Eurosept Xtra Surface Dezinfekční ubrousky bez alkoholu (bez vůně, s vůní lemon) velikost XS,S,M,L,XL	připravené k okamžitému použití 1 min. velikost M,L,XL 2 min. velikost S	A L (B)	KAS
	Velké plochy	Eurosept Xtra Surface Dezinfekce na velké plochy bez alkoholu	0,5 % 15 min.	A L (B) Rotaviry	KAS
Ruce	Běžné mytí	Eurosept Xtra Tekuté mýdlo	2-3 stlačení pumpičkou na jeden mycí cyklus	–	Ostatní
	Hygienická dezinfekce	Eurosept Xtra EP Dezinfekce rukou – gel	3 ml 30 s	A L (B)	Alkohol
	Chirurgická dezinfekce	HD 410 Dezinfekce rukou - tekutá	navlhčené ruce 90 s	A L (B) T V	Alkohol
	Péče	Eurosept Plus/Xtra Krém na ruce	0,5 - 1 ml	–	Ostatní
Eurosept Plus/Xtra Pletové mléko na ruce					
Stomatologické soupravy	Odsávání denní	Eurosept Plus Evac Dezinfekce odsávacího zařízení denní	3 % 2 min. 1 % 60 min. 2 % 5 min.	A L	KAS, Hydroxid
	Odsávání týdenní	Eurosept Plus Evac Čistič odsávacího zařízení týdenní	5% 30 min.	–	Ostatní
	Plivátko	Eurosept Xtra Čistič a dezinfekce plivátka	neředěné, cca 20 ml 1 min.	A L T	Alkohol, Ostatní
Otisky	Otisky, protetické výrobky, pomůcky	Eurosept Plus Impression Dezinfekce na otisky	neředěné 5 min.	A L (B)	Ostatní
		Eurosept Plus/ Xtra Impression Dezinfekce na otisky prášek	2% 10 minut	A L (B) T	
	Otiskovací lžice	Eurosept Xtra Impression Čistič otiskovacích lžic	5-10 % několik hodit/přes noc	–	Ostatní



## Spektrum účinnosti:

- A baktericidní
- L levurocidní (Candida albicans)
- (B) omezeně virucidní (obalené viry včetně HBV, HIV)
- B plně virucidní (neobalené viry)
- V fungicidní
- T tuberkulocidní
- M mycobaktericidní
- C sporicidní

## Účinná látka:

- Alkohol
- KAS - Kvartérní amoniové sloučeniny
- Hydroxid



# Hygienický plán - LICHÝ TÝDEN

**HENRY SCHEIN®**  
DENTAL

Místo a způsob použití		Název	Koncentrace čas expozice	Spektrum účinnosti	Účinná látka
Nástroje	Ruční nástroje	Eurosept Xtra Instrument Dezinfekce na nástroje virucidní	2 % 15 min. 1 % 60 min. 3 % 30 min.	A L (B) T A L (B) T A L T B Noroviry	KAS
		Eurosept Xtra Enzymatický čistič	0,5-1 % pro běžné znečištění, až 5 % pro silné znečištění 5-30 min. v závislosti na úrovni znečištění	-	Ostatní
	Rotační nástroje	ID 220 Dezinfekce na rotační nástroje	neředěné 1 min.	A L (B) T	Alkohol
Plochy	Malé plochy Násadce, kolénka, turbínky	Eurosept Xtra Surface Postřiková dezinfekce <b>na citlivé plochy</b> bez alkoholu <b>virucidní</b>	neředěné 2 min.	A L B T C	KAS
		Eurosept Xtra Surface Postřiková dezinfekce na malé plochy s alkoholem (bez vůně, s vůní lemon)	neředěné 1 min.	A L T M (B)	Alkohol
		Eurosept Xtra Surface Dezinfekční ubrousky s alkoholem (bez vůně) velikost XS,S,M,L,XL	připravené k okamžitému použití 5 min. velikost XS,S 1 min. velikost M,L,XL		
	Velké plochy	FD 312 Dezinfekce na velké plochy bez alkoholu	2 % 5 min.	A L (B)	Alkohol, KAS
ruce	Běžné mytí	Eurosep Xtra Tekuté mýdlo Sensitive	2-3 stlačení pumpičkou na jeden mycí cyklus	-	Ostatní
	Hygienická dezinfekce	Eurosept Xtra EP Dezinfekce rukou - gel	3 ml 30 s	A L (B)	Alkohol
	Chirurgická dezinfekce	HD 410 Dezinfekce rukou - tekutá	navlhčené ruce 90 s	A L (B) T V	Alkohol
	Péče	Krém na ruce Pleťové mléko na ruce	Eurosept Plus/Xtra	0,5 - 1 ml	-
Eurosept Plus/Xtra					
stomatologické soupravy	Odsávání denní	Orotol Plus Dezinfekce odsávacího zařízení denní	2 % 5 min.	A T V B (B)	KAS
	Odsávání týdenní	MD 555 Cleaner Čistič odsávacího zařízení týdenní	5% 30 -120 min.	-	Ostatní
	Plivátko	MD 550 Čistič a dezinfekce plivátka	neředěné, cca 20 ml 1 min.	A	Alkohol, Ostatní
otisky	Otisky, protetické výrobky, pomůcky	MD 520 Dezinfekce na otisky	neředěné 5 min.	A L (B)	Ostatní
	Otiskovací lžice	MD 535 Čistič otiskovacích lžic	neředěné několik hodit/přes noc	-	Ostatní

